

Instrukcja obsługi maseczki:

Wyjmij maseczkę z opakowania.

Zawiąż supeł na gumce.

Wyreguluj długość gumki.

Dodatkowo maseczkę można wyposażyć w jednorazowy filtr. Należy go włożyć do środka maseczki.

Załóż maseczkę na twarz.

NIE DOTYKAJ PRZEDNIEJ POWIERZCHNI MASECZKI PODCZAS JEJ UŻYWANIA.

PRZED ZDJĘCIEM MASECZKI KONIECZNIE UMYJ RĘCE.

Zdejmij maseczkę chwytając tylko za gumki.

Wyrzuć filtr jednorazowy, ponownie umyj ręce. To bardzo ważne.

Maseczkę wygotuj we wrzątku przez 30 minut.

Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę gdyż dekontaminacja nie chroni w 100% przed chorobami przenoszonymi między ludźmi poprzez używanie tych samych przedmiotów.

Instrukcja do pobrania w PDF.

DEKONTAMINACJA

Instrukcja jak oczyścić maseczkę:

Maseczkę można używać przez 2 godziny. Po dwóch godzinach należy ją oczyścić lub zmienić na nową. W przypadku użycia filtra jednorazowego, w postaci np. zwykłej chusteczki higienicznej, należy go wymieniać co 30 min. Za każdym razem po dotknięciu maseczki należy umyć dokładnie ręce.

Maseczka może być używana tylko przez jedną osobę gdyż dekontaminacja nie chroni w 100% przed chorobami przenoszonymi między ludźmi poprzez używanie tych samych przedmiotów.

Instrukcja:

1. Przed oczyszczeniem, złóż maseczkę i owiń jej włókninę gumką z maseczki. Jeśli musisz przechowywać maseczkę, włóż ją do foliowego woreczka. Koniecznie umyj ręce.
2. Złożoną maseczkę umieść we wrzącej wodzie i gotuj ją przez 30 minut. Ponownie umyj ręce. To bardzo ważne.
3. Po 30 minutach ostrożnie wyjmij maseczkę z wody. Uważaj, aby się nie poparzyć. Możesz użyć szczypiec albo innego narzędzia.
4. Wysusz maseczkę w formie złożonej. Możesz suszyć rozwieszoną, lub wykorzystać gorący piekarnik.
5. Niezłożenie i nieowinięcie maseczki gumką podczas oczyszczania może spowodować rozplisowanie się włókniny maseczki, co może utrudniać jej założenie i użytkowanie.
6. Rozplisowanie tkaniny nie wpływa bezpośrednio na jakość maseczki.